

Gallicomfort

Станок для осеменения индеек (со всеми опциями).....	арт. 027988
Станок для осеменения индеек (без опций).....	арт. 027983

Дополнительное оборудование



1 держатель для автоматической машины для наполнения пайет (MRA).....	арт. 027984
1 эргономичная подставка для руки осеменатора.....	арт. 027985
1 рампа.....	арт. 027986
1 стул для осеменатора.....	арт. 027987

Сопутствующие товары



Среда для хранения семени птицы 2,5 мл — без антибиотиков.....	арт. 002262
Среда для хранения семени птицы 4 мл — без антибиотиков.....	арт. 020070
Extendyl 5 мл.....	арт. 025880
Пайеты 70 мм.....	арт. 006929
Автоматическая машина для наполнения пайет (MRA).....	арт. 007155
Моторизованный комплект.....	арт. 019250
Электрический блок.....	арт. 008593
Шприцевая помпа для MRA.....	арт. 007161
Обучение процедуре осеменения птиц.....	арт. 024105

Gallicomfort

Станок для осеменения индеек

Все для комфорта!



Gallicomfort — это...

Gallicomfort — это станок для осеменения индеек, разработанный при участии профессионального эргономиста. Решение обеспечивает комфорт и хорошее самочувствие сотрудников и животных без ущерба для эффективности работы.




- 1 Индеек направляют по рампе на станок.
- 2 Техники по одной перемещают индеек на стол станка для осеменения, расположенный на удобной для работы высоте, и передают их осеменатору.
- 3 Осеменатор сидит на специальном стуле и фиксирует индейку, нажимая ногой на педаль. Педаль приводит в движение ролики, помогающие раскрыть отверстие яйцевода.
- 4 Эргономичная подставка позволяет без усилий направлять руку осеменатора с заполненной пайетой от MRA (автоматической машины для наполнения пайет) к индейке.
- 5 Осеменатор снова нажимает на педаль, чтобы отпустить индейку. После процедуры птица спокойно спускается по рампе.

Почему стоит выбрать Gallicomfort?

Улучшение комфорта и самочувствия сотрудников

Решение Gallicomfort разработано для улучшения условий труда персонала и снижения риска развития заболеваний опорно-двигательного аппарата:

- Индейки попадают в руки сотрудников на удобной для человека высоте
- Переносимый вес сокращается вдвое
- Используется эргономичная подставка для руки
- Стул регулируется по высоте

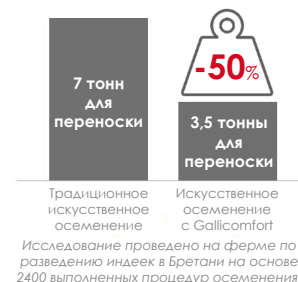

Достижение максимальной эффективности работы

Стабильно высокая продуктивность

- 700 индеек в час при участии бригады из 5 человек

Быстрое обучение бригад

- Новые сотрудники обучаются менее чем за 2 недели



Улучшение комфорта и самочувствия животных

Станок Gallicomfort также создает более комфортные условия для животных при осеменении.

- Ограниченное использование загонов, что позволяет индейкам свободно перемещаться.
- Бережное обращение с птицами: их аккуратно перемещают на станок для осеменения. После процедуры индейки спокойно спускаются по рампе.

